

Der **Balgrist**

**Traitement des lymphœdèmes et des
lipœdèmes par des produits de
compression en tricotage rectiligne**

Sylvia Knorr

Lenzburg, le 12 septembre 2019

Balgrist Tec AG

Table des matières


Der **Balgrist**

- Présentation théorique du système lymphatique
- Lymphœdème primaire et secondaire
- Classification en stades
- Signification et finalité du traitement compressif
- Caractéristiques propres aux patient(e)s
- Avantages et inconvénients des produits de compression en tricotage rectiligne
- «Autres applications?»

Balgrist Tec AG

Le système lymphatique

Der **Balgrist**

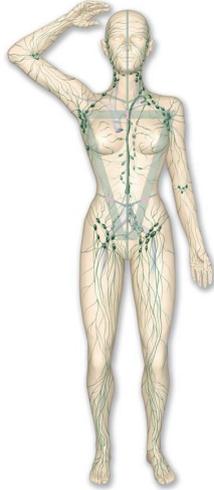


- Parcours à sens unique
- Commence dans les différents tissus périphériques de l'organisme
- «Système de drainage» de l'organisme

Page 2 | Balgrist Tec AG

Le système lymphatique

Der **Balgrist**


- Capillaires lymphatiques
- Précollecteurs
- Collecteurs
- Troncs lymphatiques

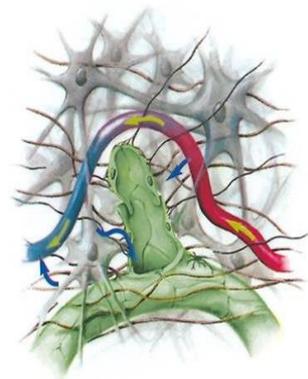

Page 3 | Balgrist Tec AG

Le système lymphatique

Der **Balgrist**

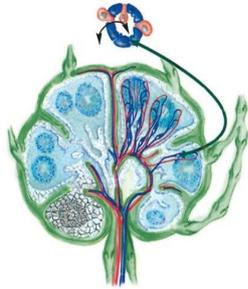


- Ganglions lymphatiques
- Organes en forme de haricot (taille: de 0,5 à 2 cm)
- Filtre et station de décontamination
- Au nombre de 300 – 700 env.
- Les principaux points de collecte sont le cou, les aisselles et les plis de l'aîne

Page 4 | Balgrist Tec AG

Le sang et la lymphe

Der **Balgrist**

- Évacuation de la charge lymphatique
- Eau
- Protéines
- Cellules mortes
- Acides gras en provenance de l'intestin
- 2 à 4 litres par jour

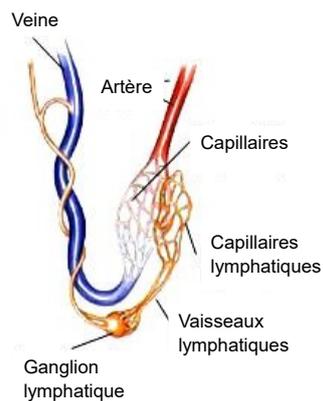

Page 5 | Balgrist Tec AG

Le lymphœdème primaire

Der **Balgrist**

- Congénital
- Anomalie du système lymphatique, diminution de la capacité de transport de la lymphe
- Par exemple, faible nombre ou réduction du nombre de collecteurs lymphatiques
- Peut être unilatéral ou bilatéral



Page 6 | Balgrist Tec AG

Le lymphœdème secondaire

Der **Balgrist**



- «Acquis»
- Consécutif à une ablation ou une lésion des vaisseaux ou des ganglions lymphatiques
- Par exemple à la suite de traumatismes, de tumeurs ou d'interventions chirurgicales

Page 7 | Balgrist Tec AG

Stade 0

Der **Balgrist**



- «Œdème latent»
- Le système est déjà altéré
- Asymptomatique
- Compensé par le reste du système

Page 8 | Balgrist Tec AG

Stade 1

Der **Balgrist**



- «Œdème spontanément réversible»
- Tuméfaction molle et pâteuse des tissus
- Le godet est positif (l'œdème laisse une empreinte)
- Le signe de Stemmer est positif
- Régression par l'élévation

Page 9 | Balgrist Tec AG

Stade 2

Der **Balgrist**



- «Œdème spontanément irréversible»
- Formation d'une fibrose
- Lente induration des tissus
- N'est plus dépressible
- Premières lésions cutanées

Page 10 | Balgrist Tec AG

Stade 3

Der **Balgrist**



- «Éléphantiasis»
- Prolifération des tissus
- Formes extrêmes, épaissements, lésions cutanées de type verrues
- Les plaies guérissent difficilement
- Vulnérabilité aux infections cutanées

Page 11 | Balgrist Tec AG

Signification et finalité du traitement compressif

Der **Balgrist**

- Stabilisation du volume et modelage de l'œdème
- Décongestion des tissus déjà altérés et sollicités du membre concerné

Caractéristiques propres aux patient(e)s

Der **Balgrist**

- Observance des patient(e)s
- Compréhension de l'importance du traitement compressif
- En premier lieu drainage lymphatique, y compris bandage de compression, puis traitement compressif
- Conscience de la situation
- Contrôle régulier du membre concerné

Qu'est-ce que le «tricotage rectiligne»?

Der **Balgrist**



Page 14 | Balgrist Tec AG

Avantages / inconvénients des produits de compression en tricotage rectiligne

Der **Balgrist**

Avantages

- Peu ou pas de formation de plis
- Coupe pointe de pied oblique, reste généralement en place sans bande adhésive
- Plus grande «longévité»
- Confectionné sur mesure pour les patient(e)s, «toutes» les formes sont donc possibles
- «Fermeté» du tissu

Inconvénients

- Mauvaise observance par les patient(e)s
- Problème de la mise en place et du retrait
- Prix

Page 15 | Balgrist Tec AG

Exemples de traitement

Der **Balgrist**



Page 16 | Balgrist Tec AG

Le lipœdème

Der **Balgrist**



- Lip(o) – racine grecque qui signifie gras, adipeux
- Prolifération de cellules adipeuses
- Douloureux
- **TOUJOURS** symétrique
- Qui dit lipœdème ne dit pas obésité

Page 17 | Balgrist Tec AG

Le lipœdème

Der **Balgrist**



Page 18 | Balgrist Tec AG

Synthèse

Der **Balgrist**

- Bilan par un spécialiste (angiologue) des facteurs médicaux et des autres soins prodigués aux patient(e)s
- Planification des étapes ultérieures avec les médecins, les thérapeutes, les cordonniers et les techniciens orthopédistes
- Conseil personnalisé et concertation avec les patient(e)s
- Contrôles réguliers des patient(e)s et du traitement

Page 19 | Balgrist Tec AG

«Autres applications?»

Der **Balgrist**

